

کد F3023

ویرایش 00



شرکت ایران ممکو

هشدارهای توصیه ای



دستگاه یونیت چشم پزشکی تاپکان

IS-1/100 Series

IRAN MEMCO

ADVISORY NOTICES

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت «ایران ممکو» نمایندگی انحصاری محصولات تاپکان در ایران تماس حاصل فرمایید.

نشانی: تهران - خ بزرگمهر - پلاک ۴۴ تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۰۳۶۶۰ فاکس: ۰۲۱-۶۶۴۰۰۷۰۹

www.imemcogroup.com

admin@imemcogroup.com

نمایه های ایمنی :

به منظور استفاده ایمن از این دستگاه و اجتناب از خطر برای اپراتور و دیگران، مشخصات و هشدارهای لازم، روی دستگاه و نیز در دفترچه راهنمای آن توضیح داده شده است.

پیشنهاد می شود که قبل از خواندن متن و «هشدارهای ایمنی» به مفهوم اشکال زیر دقت کنید.

نشانه	مفهوم : هشدار
--------------	----------------------



عدم توجه و نادیده گرفتن این علامت ممکن است منجر به خطر مرگ یا صدمات جدی گردد.

- صدمات وارده احتمالی شامل جراحت، ضرب دیدگی، پیچ خوردگی، شکستگی، سوختگی، برق گرفتگی و غیره می باشد.
- صدمات فیزیکی به احتمال آسیب به ساختمان یا تجهیزات اشاره دارد.

شکلها :

نشانه	مفهوم : احتیاط
--------------	-----------------------



این شکل نماد عملی است که از انجام آن باید اجتناب شود. مانند هرگونه آسیب فیزیکی به دستگاه و تجهیزات مورد استفاده می باشد.




یادداشت ها برای برجسته کردن موارد با اهمیت ویژه مورد استفاده قرار میگیرد که:
* باید بخاطر سپرد * کمک به انتخاب صحیح می کند * نکاتی که نیاز به بازنگری دوباره دارد



این علامتها برای بیان روشها و خصوصیات مطرح میشود که پیامدهای احتمالی (کاربری دستگاه ها) و تاثیر آنها در محیط زیست را باید در نظر داشت.

یونیت مورد نظر برای تسهیل در قرار دادن لوازم و دستگاه‌های چشم پزشکی در حین کار با بیمار و تشخیص طراحی شده است. برای انجام این امر یک سری کنتاکت های برقی تعبیه شده است و همچنین برای نشستن بیمار بر روی یونیت مذکور از بالابرها و پایین برهای برقی استفاده شده است.

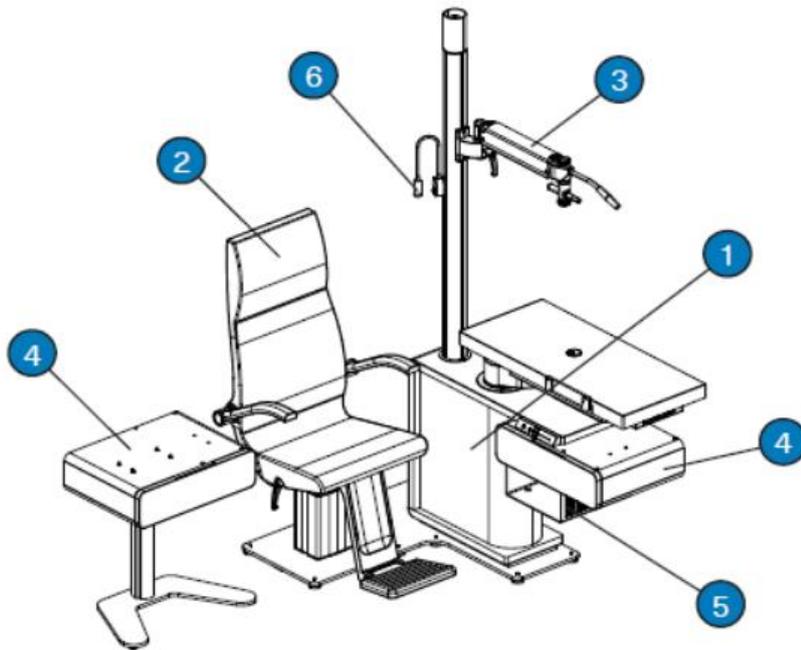

- ۱- یونیت چشم پزشکی (بخش ۳.۲.۱ را ببینید)
- ۲- صندلی (بخش ۳.۳ را ببینید)
- ۳- بازوی فروپتر (انتخابی)
- ۴- کشوی لنز (انتخابی) بخش ۳.۴ را ببینید.
- ۵- کمک به CV 5000 PS (انتخابی)
- ۶- لامپ برای دید نزدیک (انتخابی)

۴.۱.۱ - روشن کردن یونیت

دستگاه را با وصل کردن یونیت به برق روشن کنید. لامپ یونیت باید در حالت آبی باشد.

۴.۱.۲ - خاموش کردن دستگاه:

در هنگام اتمام کار با دستگاه یا زمانی که قرار است دستگاه به مدت طولانی خاموش باشد آن را از برق بکشید.

۴.۱.۳ - خاموش کردن دستگاه برای طولانی مدت

اگر قرار است دستگاه برای طولانی مدت خاموش باشد آن را از برق خارج نمایید.

نگهداری

به منظور عملکرد ایمن دستگاه، تمامی موارد مربوط به نگهداری این دستگاه بجز مواردی که در این دفترچه به آن اشاره شده است، باید به متخصصین فنی آموزش دیده شرکت نماینده تاپکان ارجاع داده شود.

- از سوی دیگر، یک سری اقدامات مشخص برای نگهداری از دستگاه وجود دارد که باید توسط خود پزشک انجام گیرد.
- از تمیز کردن دستگاه هنگامی که اجزاء الکترونیکی به آن متصل اجتناب کنید.
- هرگز برای تمیز کردن دستگاه از کف یا مواد شوینده خانگی استفاده نکنید.
- به طور منظم با استفاده از پارچه های نرم گرد و خاک دستگاه را بگیرید، در صورت وجود هرگونه لک بر روی دستگاه از پارچه ای نرم آغشته با آب یا الکل (نهائماً ۷۰٪) استفاده نمایید.

دستگاه ها را با پارچه مرطوب و کمی ماده شوینده تمیز کنید. استفاده از مواد شیمیایی میتواند منجر به صدمه به قسمت های زیر شود:

- قسمت های چوبی دستگاه
- قسمت های داخلی دستگاه
- قسمت های فلزی دستگاه

دیگر ادوات چشم پزشکی را مستقیماً بر روی یونیت قرار ندهید.

بعد از استفاده از دستگاه همه ادوات متصل به یونیت را به صورت کامل خاموش کنید. در صورت خاموش بودن یونیت برای مدت زمان طولانی آن را از برق بکشید. درپوش را درآورید، به هیچوجه درپوش را محکم و به زور بیرون نکشید. زیرا باعث قطعی سیم های داخلی، برق گرفتگی و آتش سوزی میشود.

قبل از تکان دادن صندلی یا صفحه، از اینکه بیمار بر روی یونیت ننشسته باشد اطمینان حاصل نمایید.

استفاده از این دستگاه فقط توسط افرادی که آموزش کامل دیده‌اند، مجاز است.

توجه:

در صورت بروز هرگونه اشکال در دستگاه ابتدا به قسمت Trouble Shooting دفترچه راهنمای مربوطه مراجعه شود و چنانچه موفق به رفع اشکال نشدید از دستکاری و اقدام به تعمیر خودداری نموده و سریعاً موضوع را به واحد خدمات پس از فروش شرکت اطلاع دهید. در غیر اینصورت شرکت مسئول جبران خسارات وارده احتمالی نخواهد بود.

تصاویر مندرج در متن به مدل خاصی اشاره نداشته و جنبه عمومی آن مورد نظر می باشد. ممکن است در بعضی از مدلها تفاوتهایی مشاهده شود.